


## RYCHLÝ NÁVOD

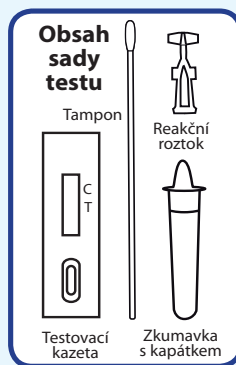


### NEGATIVNÍ

Je-li test negativní, je testovanému umožněna účast na prezenční výuce.

### POZITIVNÍ

Při pozitivním výsledku je testovaný ihned odeslán do izolační místnosti. Je nutné vydezinfikovat všechny plochy, kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.


WWW.GOODTEST.CZ

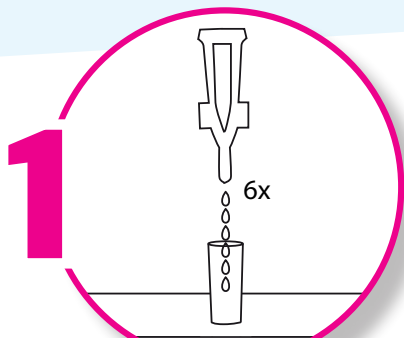


**1** Lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru. Stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.




**2** Zasuňte tampón do nosní díry přibližně 2,5 cm hluboko. Přejedte jí 5x podél sliznice nosní díry, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tampónem i u druhé nosní díry.

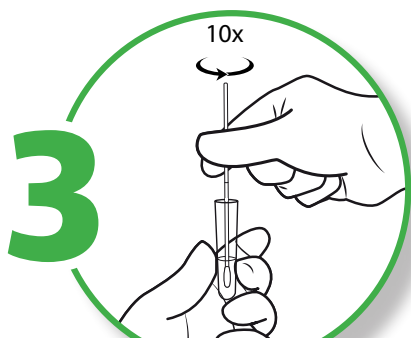


**3** Vložte tampón se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 10x. Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.

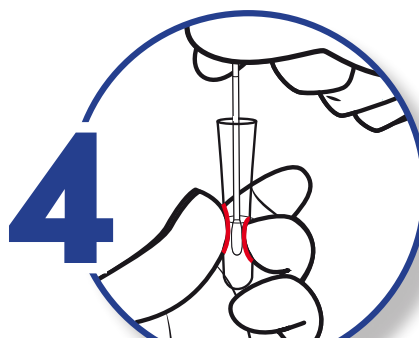

**4** Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampón, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny. Nainstalujte odkapávač na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.

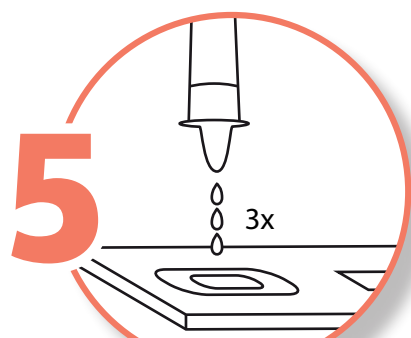

**5** Oteřete sáček a z hliníkové fólie vyjměte testovací kazetu. Nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku do otvoru pro vzorek v testovací kazetě a spusťte stopky.

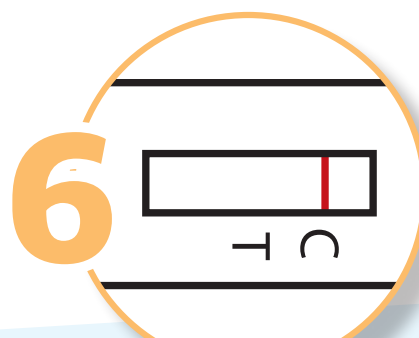

**6** Počkejte, až se v okénku na testovací kazetě objeví barevný proužek. Výsledek by měl být přečten za 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

#### Interpretace výsledků



Positivní



Negativní



Neplatný